

【A】又は【B】の欄に【○】若しくは【△】が付いている機種は20滴セットが使用可能

問合せ先	製造販売元	販売名	機種名・型番等	医療機器承認番号		【A】※1 20滴/mLセット 使用可能 (通常状態)	【B】※2 20滴/mLセット使用 可能に変更可	【C】※3 20,60滴/mLセット 以外消去可能	補足事項	
				新承認番号体系	旧承認番号体系					
株式会社ジェイ・エム・エス	株式会社メテク	大塚輸液ポンプOT-501	OT-501	-	60B第1187号	×	×	×	修理終了	
		大塚輸液ポンプOT-601	OT-601	-	03B第0180号	○	-	×	前期型修理終了	
		大塚輸液ポンプOT-701	OT-701	21200BZZ00527000	-	×	○	×	滴数制御時のみ変更可能	
		大塚輸液ポンプOT-711	OT-711	21200BZZ00528000	-	×	○	×		
		大塚輸液ポンプOT-707	OT-707	21600BZZ00118000	-	×	○	○		
		大塚輸液ポンプOT-707G	OT-707G	21600BZZ00119000	-	×	○	○		
		大塚輸液ポンプOT-777	OT-777	21600BZZ00121000	-	×	○	○		
		輸液ポンプOT-707	OT-707	21600BZZ00118000	-	×	○	○		
		輸液ポンプOT-707G	OT-707G	21600BZZ00119000	-	×	○	○		
		輸液ポンプOT-777	OT-777	21600BZZ00121000	-	×	○	○		
大研医器株式会社	大研医器株式会社	クーデック 輸液ポンプ	CIP-100	21600BZZ00649000		○	-	○		
テルモ株式会社	テルモ株式会社	テルフュージョン輸液ポンプTE-111	TE-111		05B-415	×	×	×	修理終了	
		テルフュージョン輸液ポンプTE-112	TE-112	20800BZZ00693000		○	-	×	販売終了	
		テルフュージョン輸液ポンプTE-131	TE-131	21500BZZ00481000		△ (汎用セットのみ)	-	△ (汎用セットのみ)	ポンプ専用セット使用時は15,60滴/mLのみが設定・使用可能	
TE-131A		○ (汎用セットのみ)	○ (専用セット)		○					
株式会社トップ	株式会社トップ	トップ輸液ポンプTOP-3100	TOP-3100	20300BZZ00653000	03B第653号	△ (汎用セットのみ)	-	×	注#TOP-Hポンプ専用セット使用時は15滴/mLのみが設定・使用可能	
		トップ輸液ポンプTOP-2200	TOP-2200	TOP-2200	20500BZZ00723000	05B第0723号	△ (汎用セットのみ)	-	×	3桁表示、注#同上
			TOP-2200 R	TOP-2200 R	20500BZZ00723000	05B第0723号	△ (汎用セットのみ)	-	×	4桁表示、注#同上
			TOP-2200 B	TOP-2200 B	20500BZZ00723000		△ (汎用セットのみ)	-	×	4桁表示/気泡センサ、注#同上
			TOP-2200 H	TOP-2200 H	20500BZZ00723000		○	-	×	事故防止対策品
		TOP-2200 S	TOP-2200 S	20500BZZ00723000		○	-	○	20,60滴/mL以外消去可能	
		トップ輸液ポンプTOP-3300	TOP-3300	TOP-3300	21100BZZ00198000		○	-	×	
			TOP-3300 H	TOP-3300 H	21100BZZ00198000		○	-	×	事故防止対策品
TOP-3300 S	TOP-3300 S	21100BZZ00198000		○	-	○	20,60滴/mL以外消去可能			
日機装株式会社	日機装株式会社	輸液注入ポンプPFA-12	PFA-12	16000BZZ01233000	(60B)第1233号	○	-	×		
		輸液ポンプPFA-15	PFA-15	20100BZZ00421000	(01B)第0421号	○	-	×		
		輸液ポンプPFA-16	PFA-16	21000BZZ00228000	-	○	-	×	製造番号 N8A01-01~N9B08-20 60001-01~64013-20	
		輸液ポンプPFA-16	PFA-16	21000BZZ00228000	-	○	-	○	製造番号 65001-01~	

※1【A】20滴/mLセット使用可能 ⇒ 通常状態(納入状態)で、現時点でも20滴/mL使用可能

※2【B】20滴/mLセット使用可能に変更可 ⇒ 通常状態では使用可能でないが、内部切換等で使用可能にすることができる

※3【C】20,60滴/mLセット以外消去可能 ⇒ 現時点で様々な滴数が選択可能であるが、内部切換等で20,60滴/mL以外消去することができる

○:20滴/mL対応仕様の項目内容に装置が合致している

△:20滴/mL対応仕様の項目内容に装置が一部が合致している(又は一部が合致していない)

×:20滴/mL対応仕様の項目内容に装置が合致していない