

## 経腸栄養用変換コネクタの使用に関するご注意

経腸栄養用の変換コネクタは、経腸栄養分野の製品で混在する新旧規格（ISO 80369-3 と 888 号規格）のコネクタを接続するために用いるものです。

消化管の減圧や排液目的とするチューブ（イレウス管・経鼻胃管など）には、経腸栄養用変換コネクタは使用しないでください。

またラベルに ISO 80369-3 と記載されている経腸栄養用のシリンジも上記チューブに使用しないでください。

**【減圧・排液用の製品に ISO 80369-3 規格のシリンジと変換コネクタを組み合わせると、吸引物によって詰まりが生じることがありますので、使用しないでください。】**

